

PROTOCOLO

ACONDICIONAMIENTO Y TOMA DE MUESTRA PARA ANÁLISIS DE PARÁSITOS GASTROINTESTINALES Y FASCIOLA**1. GASTROINTESTINALES**

Las muestras deben ser colectadas del recto de los animales. Las muestras remitidas deben ser del mayor número posible de animales del rodeo y preferentemente, individuales. Deben venir en bolsitas de nylon o frasquitos llenos hasta arriba para no dejar un espacio superior con aire, evitando así la eclosión de los huevos. **Deben pesar por lo menos 10-20 gr (mínimo 5 gr).**

Si el número de animales a muestrear es reducido (15 a 20 animales) es conveniente testear todos los animales. De lo contrario, extraer muestras de un 5 a 10 % de una categoría determinada.

Para Gastrointestinales, no es aconsejable hacer pool de muestras.

Las muestras deben ser enviadas con refrigeración (preferiblemente refrigerantes congelados y no hielo) .

2. FASCIOLA HEPÁTICA

Las muestras deben ser enviadas con refrigeración, en bolsitas de nylon o frascos sin cámara de aire y deben ser mantenidas a $4^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}\text{C}$ hasta ser procesadas, no más de 9 días desde su extracción.

Se puede efectuar una muestra compuesta (pool) con un total de 3-5 muestras, tomando de 5 a 10 gr de materia fecal de cada una .

Elaborado por: CA

Aprobado por: DH

PARA VISUALIZAR LOS RESULTADOS DE LOS ANÁLISIS LE SUGERIMOS DESCARGAR LA APLICACIÓN DE COLAVECO EN LAS SIGUIENTES PLATAFORMAS:

**COLAVECO / LABORATORIO AGROINDUSTRIAL**

Parque "El Retiro" / Nueva Helvecia
Dpto.Colonia / Uruguay

Tel/Fax: + 598 4554 5311 / 5975
Cel.: + 598 92019601

contacto@colaveco.com.uy
www.colaveco.com.uy